

exeol surf 60

Désinfectant de surfaces

► Solution prête à l'emploi pour la désinfection des surfaces, du mobilier et des équipements lourds, préalablement nettoyés.

▪ Association synergique originale de trois actifs antimicrobiens (effet SCALE).

▪ Actif dès 30 secondes (bactéries, levures, virus enveloppés).

▪ Haut pouvoir de couverture de la solution (TS < 29mN/m).



Mode d'emploi

⚠ **exeol surf 60** s'utilise non dilué sur une surface préalablement nettoyée et rincée.

▪ **Flacon 1L spray :**

Lors de la première utilisation, détacher la protection d'inviolabilité de la buse.

1. Déverrouiller la sécurité du spray.

2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 32\text{mL}/\text{m}^2$, à 20-30cm de la surface).

3. Temps de contact : dès 30 sec. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.

4. Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact direct avec la peau).

Verrouiller la sécurité après utilisation.

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

▪ **Bidon 5L :**

Le bidon de 5L est conçu pour une utilisation en pulvérisateur à pression préalable. Il n'est pas conçu pour recharger d'autres flacons.

Lors de la première utilisation, avant de dévisser le bouchon, retirer la bague d'inviolabilité.

1. Dévisser le bouchon du bidon et transvaser le contenu dans le pulvérisateur avant la mise sous pression. Refermer le bouchon du bidon.

2. Pulvériser uniformément sur la surface de manière à bien couvrir la zone à traiter ($\pm 32\text{mL}/\text{m}^2$, à 20-30cm de la surface).

3. Temps de contact : dès 30 sec. selon le spectre d'activité recherché. Après le temps de contact approprié, laisser sécher ou essuyer avec une lingette sèche.

4. Ne pas rincer (excepté les surfaces en contact direct avec la peau).

Répéter l'opération de désinfection chaque fois que nécessaire.

Présentations commerciales

▪ Carton 12 x 1L spray : EXS0029FR

▪ Carton 2 x 5L : EXS0030FR

▪ Existe aussi au format lingettes : **exeol wipes 60**



SURFACES

PRODUIT

effet
SCALE

LARGE
SPECTRE

DÈS
30 SEC.

BONNES PRATIQUES



Dossier produit disponible sur
www.exeol.fr

SANTÉ
exeol

UNE DIVISION SODEL

exeol surf 60

Désinfectant de surfaces

Propriétés microbiologiques

Conditions de propreté, prêt à l'emploi, 20°C :

	ESSAIS	SOUCHES	TEMPS DE CONTACT
Bactéricide	EN 13727	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae</i>	30 sec.
	EN 17387	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	
	EN 1276 EN 13697	<i>Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli</i>	
Levuricide	EN 13624 EN 17387	<i>Candida albicans</i>	30 sec.
	EN 1650 EN 13697		
Fongicide	EN 13624 EN 17387	<i>Candida albicans, Aspergillus brasiliensis</i>	15 min.
Virucide contre les virus enveloppés ¹	EN 14476 EN 16777	Virus de la Vaccine ¹ souche <i>Elstree</i>	30 sec.
Virucide à spectre limité	EN 14476 EN 16777	Adénovirus, Norovirus	3 min.
Actif sur SARS-CoV-2, Rotavirus	EN 14476	SARS-CoV-2 isolat de Coronavirus Rotavirus, souche SA-11	30 sec.
Mycobactéricide	EN 14348	<i>Mycobacterium terrae, Mycobacterium avium</i>	5 min.

¹Le Virus de la Vaccine est le virus représentatif des virus enveloppés présentés dans l'Annexe A de la norme EN 14776+A2 et de la norme EN 16777, comme par exemple : Virus de l'hépatite B (VHB) ; Virus de l'hépatite C (VHC) ; Virus de l'hépatite E (VHE) ; Virus de l'immunodéficience humaine (VIH) ; Herpesviridae (Herpèsvirus) ; Coronavirus ; Virus de la grippe, de la rage, de la rubéole, de la rougeole ; ...

Composition	Caractéristiques	Précautions
Préparation liquide biocide TP2. Substances actives biocides (% m/m) : Ethanol (CAS : 64-17-5) 59,74% ; Chlorure de didécylidiméthylammonium (CAS : 7173-51-5) 0,07% ; Propionate de didécylméthylpolyoxyéthyl ammonium (CAS : 94667-33-1) 0,06%.	<ul style="list-style-type: none">pH : 6 - 7Parfum : Non parfuméCouleur : Incolore	Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. UFI : PQ39-X0JT-900W-E58W 

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

 Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr


UNE DIVISION SODEL